

Ortos - Denis Browne

Guide för hantering och skötsel



Om din ortos

Denis Browne-ortosen är en vidareutvecklig av den så kallade PEVA-foten (Ponseti-metoden). Ortosen syftar till att bibehålla den korrektion som tidigare gipsbehandling gett.

Den första tiden efter att du börjat använda ortosen kan ibland vara besvärlig eftersom barnet är ovan vid situationen. Dessa problem brukar vanligtvis gå över efter ett par dagar.

Användning

För att minimera risken av att den tidigare felställningen kommer tillbaka bör du alltid använda Denis Browne-ortosen enligt instruktion från er läkare eller handläggare. Tänk på att alltid använda en ren och sömfri strumpa i skorna och som du gärna byter ut två gånger per dag.

Skötsel

Håll ortosen ren genom att kontinuerligt torka av den med hjälp av en fuktig trasa. Om den skulle gå sönder eller om du upplever att skorna blir för små, kontakta oss då för en justering.

Begränsning/försiktighet

När ortosen är ny är det viktigt att du följer anvisningarna du fått från er handläggare. Var extra uppmärksam på eventuella tryckmärken eller skavsår. Om tryckmärken eller rodnad inte skulle försvinna inom 20 minuter bör du alltid kontakta oss på ditt ortopedtekniska center för vägledning.

Kontakta oss

Vi är glada att kunna ge dig råd om just din situation och bistå dig med vår erfarenhet, vårt produktkunnande och vår service.

Kontakta oss gärna för ett personligt möte. På vår hemsida hittar du din närmaste Aktiv Ortopedteknik.